

Kurzanleitung zur Installation der Berichtssoftware Vitalograph Reports für die Erstellung eines Spirometrie-Ausdruckes als PDF-Dokument

Diese Installationsanleitung richtet sich an PC-Nutzer mit Installationsgrundkenntnissen. Grundsätzlich empfehlen wir vor Installation die Lektüre der ausführlichen Installationsanleitung mit selbsterklärenden Bildern. Sie finden diese auf der Vitalograph Reports Software-CD unter „Dokumentation“ > „Bedienungsanleitung“. Oder überlassen Sie die Installation bei passender Gelegenheit Ihrem EDV-Administrator.

Systemvoraussetzungen:

- Windows 2000 mit installiertem Internet Explorer 6.0 oder Windows XP
- Die Installation erfordert Administrator-Berechtigungen.

Installationsanleitung für das Hand-Spirometer Vitalograph 2120

Vorbereitungen:

1. Wählen Sie im 2120 Hand-Spirometer unter dem Menüpunkt >>SETUP >>Drucker >>Hewlett Packard aus.
2. Verbinden Sie das seriellen PC-Verbindungskabel (Vitalograph Artikelnr. 2120060) mit der seriellen Schnittstelle Ihres PCs.
3. Fahren Sie fort mit dem Punkt: **Report (Berichts-) Software Installation.**

Sollte Ihr PC über keine serielle Schnittstelle verfügen, installieren Sie bitte einen Vitalograph USB-Seriell-Konverter (bestehend aus Kabel + Treiber-CD) wie folgt:

1. Schließen Sie das USB-Seriell-Konverterkabel an einem USB-Port Ihres PC'an. Es erscheint das Dialogfenster: „Neue Hardware gefunden“. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Seriell-Konverterkabels mit dem seriellen Kabel des 2120.
2. Legen Sie die USB-Seriell-Konverter-CD in das CD-Rom Laufwerk Ihres PCs, um die nötigen USB-Treiber zu installieren. Es öffnet sich der Microsoft-Assistent für das „Suchen neuer Hardware“.
3. Bestätigen Sie die Hardwaretreiberinstallation und belassen die Einstellung im Microsoft-Dialogfenster: „Nach einem passenden Treiber für das Gerät suchen“. Folgen Sie den Anweisungen der automatischen Installation; bei der Frage nach dem „Installationspfad der Treiber“ selektieren Sie „CD“.
4. Im Microsoft „Gerätmanager“ unter „Anschlüsse COM und LPT „ wird nach erfolgreicher Installation der Treiber „ATEN USB to Serial Bridge COM X “ aufgeführt. Bitte notieren Sie die Nummer des hier zugewiesenen COM-PORTS.

Vitalograph Reports Berichtssoftware Installation:

1. Legen Sie nach erfolgter Installation der Hardware die Vitalograph Reports Software in das DVD/CD-ROM Laufwerk ein. Die CD startet selbständig.
2. Wählen Sie auf der CD „Software Installation“ > „Vitalograph Reports“.
Zuerst wird automatisch Microsoft Netframework 2.0 installiert, sofern nicht schon vorinstalliert. Bestätigen Sie hier auch alle Windows-Abfragen positiv.
3. Die Installation der Vitalograph Reports Software erfolgt nun in der Regel automatisch, bestätigen Sie wieder alle Abfragen positiv. Beenden Sie „Software Installation“.



Vitalograph Reports Berichtssoftware Einstellung für das 2120:

1. Starten Sie die Report (Berichts-) Software durch Doppelklick auf das Vitalograph Symbol, welches nach erfolgreicher Installation auf dem Desktop oder unten rechts in der Taskleiste erscheint.
2. Definieren Sie unter „Comms-Einrichtung“ im Dialogfeld den Menüpunkt „Drucker und Geräteeinrichtung“:
 - „Drucker für Vitalograph Reports einrichten“ = Ihr Praxis-Drucker
 - „Vitalograph-Gerät auswählen“ = Vitalograph 2120
 - „Kommunikationsport“ = Der zugewiesene COM-PORT (siehe oben)
3. Drücken Sie im Menü auf „Start >“; Es wird die Verbindung zwischen dem 2120 und der Vitalograph Reports Berichtssoftware hergestellt.

Ausdruck des Spirometrie-Berichts nach installierter Report (Berichts-) Software auf dem PC:

1. Führen Sie die Spirometrie-Tests wie gewohnt mit dem Vitalograph 2120 durch.
2. Beim Befehl „Drucken“ wird der Ausdruck als PDF generiert. Standardmäßig finden Sie Ihre Spirometrie-Berichte, nach Zeitstempel sortiert, in der Verknüpfung des Ordners „Vitalograph Reports PDF Files“, welche automatisch auf dem Desktop installiert wurde. Die PDFs mit den Spirometrie-Berichten werden automatisch wie beschrieben abgelegt, ohne dass sie vorher auf dem Bildschirm erscheinen.
3. Zum Ansehen der Berichte, doppelklicken Sie auf die entsprechende PDF Datei.

