

Kurzanleitung zur Installation der Berichtssoftware Vitalograph Reports für die Erstellung eines Spirometrie-Ausdruckes als PDF-Dokument

Diese Installationsanleitung richtet sich an PC-Nutzer mit Installationsgrundkenntnissen. Grundsätzlich empfehlen wir vor Installation die Lektüre der ausführlichen Installationsanleitung mit selbsterklärenden Bildern. Sie finden diese auf der Vitalograph Reports Software-CD unter „Dokumentation“ > „Bedienungsanleitung“. Oder überlassen Sie die Installation bei passender Gelegenheit Ihrem EDV-Administrator.

Systemvoraussetzungen:

- Windows 2000 mit installiertem Internet Explorer 6.0 oder Windows XP
- Die Installation erfordert Administrator-Berechtigungen.

Installationsanleitung für das Spirometer Vitalograph ALPHA IV

Vorbereitungen:

1. Drücken Sie die Taste „8“ – Konfiguration im Hauptmenü des ALPHA Spirometers.
2. Betätigen Sie jetzt im folgenden Menü die Taste „1“- Einstellungen. Ändern Sie mit der Taste „1“ den Standarddrucker von „Interner Drucker“ auf „An PC Senden“.
3. Legen Sie die Vitalograph Reports Software in das DVD/CD-ROM Laufwerk ein. Die CD startet selbständig.
4. Verbinden Sie jetzt das ALPHA und den PC mittels USB-Kabel. Sie erhalten normalerweise eine Systemmeldung, „Neue Hardware gefunden“.

Vitalograph Reports Berichtssoftware Installation:

1. Installieren Sie zuerst den Vitalograph ALPHA USB-Controller von der CD wie jeden anderen handelsüblichen USB-Treiber, indem Sie die automatische Windows-Geräteinstallation befolgen und alle Windows-Abfragen positiv bestätigen.
2. Danach erfolgt die Installation von Vitalograph Reports: Klicken Sie auf der CD „Software Installation“ > „Vitalograph Reports“.
Zuerst wird automatisch Microsoft Netframework 2.0 installiert, sofern nicht schon vorinstalliert. Bestätigen Sie hier auch alle Windows-Abfragen positiv.
Die Installation der Vitalograph Reports Software erfolgt nun in der Regel automatisch, bestätigen Sie alle Abfragen positiv. Beenden Sie „Software Installation“.

Vitalograph Reports Berichtssoftware Einstellung für das ALPHA IV:

1. Starten Sie die Vitalograph Reports Berichtssoftware durch Doppelklick auf das Vitalograph-Symbol, welches nach erfolgreicher Installation auf dem Desktop oder unten rechts in der Taskleiste erscheint.
2. Definieren Sie unter „Comms-Einrichtung“ im Dialogfeld den Menüpunkt „Drucker und Geräteeinrichtung“:
 - „Drucker für Vitalograph Reports einrichten“ = Ihr Praxis-Drucker
 - „Vitalograph-Gerät auswählen“ = Vitalograph ALPHA
3. Drücken Sie im Menü auf „Start >“; Es wird die Verbindung zwischen dem ALPHA und der Vitalograph Reports Berichtssoftware hergestellt.

Ausdruck des Spirometrie-Berichts nach installierter Report (Berichts-) Software auf dem PC:

1. Führen Sie die Spirometrie-Tests wie gewohnt mit dem Vitalograph ALPHA durch.
2. Beim Befehl „Bericht“ wird der Ausdruck als PDF generiert. Standardmäßig finden Sie Ihre Spirometrie-Berichte, nach Zeitstempel sortiert, in der Verknüpfung des Ordners „Vitalograph Reports PDF Files“, welche automatisch auf dem Desktop installiert wurde.
Die PDFs mit den Spirometrie-Berichten werden automatisch wie beschrieben abgelegt, ohne dass sie vorher auf dem Bildschirm erscheinen.
3. Zum Ansehen der Berichte, doppelklicken Sie auf die entsprechende PDF Datei.

