

GDT-Schnittstellenprotokoll Spirotrac V

Geräte Daten Träger - GDT - ist ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll für medizinische **Messgeräte und Arztpraxis-EDV**-Systeme.

Vitalograph Spirotrac V kann mittels GDT-Schnittstelle in alle gängigen Praxisverwaltungssysteme eingebunden werden. Unsere GDT-Schnittstelle wurde vom QMS (Qualitätsring Medizinischer Software) unabhängig zertifiziert.

Die Installation und/oder Einbindung sollte grundsätzlich, wie im Quick-Start-Guide beschrieben, durch den Praxis-EDV-Administrator erfolgen. Die Werte müssen lediglich in Ihr Patientenverwaltungssystem korrekt eingegeben werden:

Satzartvarianten:	6302, 6310, 6311
GDT-ID des Empfängers:	LUFU (FK 8315)
GDT-ID des Senders:	EDV1 (FK 8316)
GDT-Version:	02.10 (FK 9218)
	FK für Importfilter
Programmaufruf:	(Installationsverzeichnis Spirotrac V) Spiotrc.exe /edv
Programmaufruf 6311:	(Installationsverzeichnis Spirotrac V) Spiotrc.exe /tid
Arbeitsverzeichnis:	GDT-Dateispeicherort

Das Arbeitsverzeichnis kann in Spirotrac V unter Optionen → Erweitert → GDT-Dateispeicherort ausgewählt werden.

Dateiendung sind nach GDT-Spezifikation von 001 - 999 möglich
(**LUFUEDV1.001** – LUFUEDV1.999, **EDV1LUFU.001** – EDV1LUFU.999)

Spirotrac V muss aus der Arztpraxis-EDV mit dem Parameter /edv oder /tid gestartet werden.

6302 = Spiotrc.exe <space> /edv
6311 = Spiotrc.exe <space> /tid

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Support gerne unter der +49 40 547391-14 zur Verfügung.

oder per E-Mail: support@vitalograph.de

Stand: April 2010
Vitalograph GmbH

